

FA102

小程序操作说明



CMIID ID:2017CP3411
操作前请仔细阅读本手册
REV A.0

产品操作

【扫描进入小程序】

打开微信→发现→小程序,搜索【小林秘书】或扫下方二维码添加小程序



小林秘书小程序

小林秘书小程序使用说明

【首页】


点击“+”按钮,扫描设备上二维码,可添加新的设备。

- ✔ 表示为当前默认显示的设备使用者
- 👑 表示当前设备使用者是否为会员
- ⊕ 表示可添加新设备
- 📶 设备信号
- 🔋 设备电量
- 绿色表示正常
- 灰色表示离线
- 红线表示报警
- 👤 今日步数
- 👑 会员套餐
- 💰 账户余额
- ☎ 拨打电话
- 📍 历史轨迹
- 📊 测量记录
- ⚙ 更多功能



【拨打电话】

拨打当前默认显示设备的电话号码。

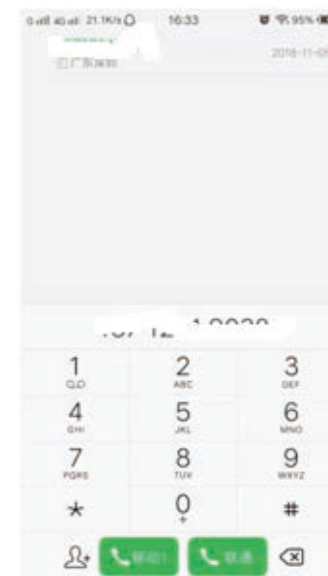

【历史轨迹】

可以查看选定日期内设备的轨迹。



【测量记录】

可以查看近期设备使用者的测量记录,显示血压,血氧、温度、血糖、体脂测量数据。



【更多功能】

设备设置页面包括:紧急联系人、来电白名单、接听方式、通话设置、话费流量查询、久坐提醒、用药提醒、闹钟提醒、GPS上传间隔设置、安全标签(辅助定位)及测量设备管理(目前支持我司生产的血压计、血氧仪、血糖仪、红外体温计及智能体脂秤)。



【我的---设备管理】

设备管理功能可以对绑定的设备进行增加、删除、修改及默认显示等功能设置。

